



MISFIT

設定ガイド

MISFITアプリ 初期登録手順

MISFITをご利用の場合は、RenoBodyと同期する前に、MISFITアカウントを作成してください。

1 MISFITアプリのインストール

画面の案内に従い、「新規登録」を行います。



2 MISFITアカウントの作成


メールアドレスでの登録をお願いいたします。※SNSアカウントで登録した場合は連携できません。

3 身体情報の登録

単位の選択において、身長「m(メートル)」、体重「kg」を選択ください。

4 ペアリング設定

アプリの案内に従ってペアリングを行います。

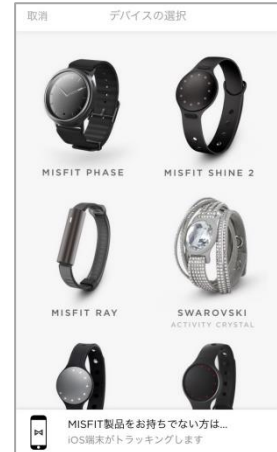

5 RenoBodyアプリの設定

MISFIT設定完了後、RenoBodyアプリのMENU>デバイス設定にてMisfitを選択し「設定する」をタップします。



6 MISFITとRenoBodyの連携

MISFITログイン画面に遷移します。[2]で設定したMISFITアカウントを入力ください。



7 設定完了

以上で設定は完了です。

- MISFITアプリに同期された歩数をRenoBodyに反映します。
- MISFITの過去7日間分の歩数を取っています。MISFITアプリに同期していない場合はRenoBodyに反映しませんので、定期的に同期してください。