

OMRON connect

設定ガイド

OMRON connectアプリ 初期登録手順 <iPhone>

OMRON connectをご利用の場合は、RenoBodyでOMRON connectと同期する前に、OMRON connectアカウントを作成してください。

1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、活動量計・体重組成計を設定する



2 OMRON connectアプリ設定完了後

OMRON connectアプリメニューを開き、「連携アプリ・サービス」を開く



3 OMRON connectとRenoBodyの連携①

「RenoBody」をタップ



「OK」をタップ



4 OMRON connectとRenoBodyの連携②

「同意する」をタップ



5 OMRON connectとiOSヘルスケアの連携

iOSヘルスケアに連携させたいデータを「ON」に変更し、「許可」をタップ

<歩数を連携する場合>



<体重を連携する場合>




6 RenoBodyアプリの設定

MENU> デバイス設定でiOSヘルスケアに変更してを「設定する」をタップ



7 RenoBodyとiOSヘルスケアの連携

全てのカテゴリを「ON」に変更し、「許可」をタップ。

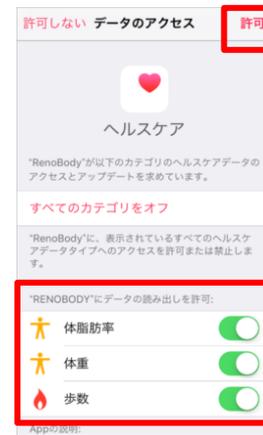

8 設定完了

- 設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。
- 活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリ、およびiOSヘルスケアアプリで歩数が同期されていることを確認後にRenoBodyを起動し、歩数を更新してください。

OMRON connectアプリ 初期登録手順 <Android>

OMRON connectをご利用の場合は、RenoBodyでOMRON connectと同期する前に、OMRON connectアカウントを作成してください。

1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、活動量計・体重組成計を設定する



2 OMRON connectアプリ設定完了後

OMRON connectアプリメニューを開き、「連携アプリ・サービス」を開く



3 OMRON connectとRenoBodyの連携①

「RenoBody」をタップ



「Google Play版」、「auスマートパス版」、「アプリ超ホーダイ版」の選択肢が表示されます。ご利用のマーケットのアプリ名を選択してください。

4 OMRON connectとRenoBodyの連携②

「同意する」をタップ



5 RenoBodyアプリの設定①

<歩数を連携する場合>

「MENU>デバイス設定」でOMRON connect」を選択し、「設定する」をタップ



6 RenoBodyアプリの設定②

<体重を連携する場合>

「MENU>デバイス設定」画面を下にスクロールし、体重連携設定の「OMRON connect」をチェックし、「設定する」をタップ



7 設定完了

- 設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。
※設定前に計測されたデータは反映しません。
- 活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリ、およびiOSヘルスケアアプリで歩数が同期されていることを確認後にRenoBodyを起動し、歩数を更新してください。